

**煮沸**

## ヒートマチック連続注射器(5基)

(0.3mlモデル、0.5mlモデル、1.0mlモデル、2.0mlモデル、5.0mlモデル)

動物用一般医療機器



- 煮沸消毒が可能です。
- 10基注射針用アダプタが標準添付
- ビルドイン機構なのでポンプ部の分解不要  
↓  
洗浄、消毒の際、微細な部品が紛失することはありません
- 液量が確認できる目盛付プラスチック注射筒です
- ワンタッチ式ボトルマウントです
- 本体の分解箇所は1箇所ですのでメンテナンスが容易です
- バスケットは50ml、100mlボトル用です

**\* 堅牢、長持ちです。**

簡単構造と高強度のエンジニアリングプラスチックの使用により高い耐久性を実現

**\* 細かい設定も簡単、正確にできます。**

0.3mlモデル(8300002189): 0.1ml~0.3ml容量調整できます。(0.05ml 刻み目盛)

0.5mlモデル(8300034316): 0.1ml~0.5ml容量調整できます。(0.05ml 刻み目盛)

1.0mlモデル(8300007181): 0.1ml~1.0ml容量調整できます。(0.05ml 刻み目盛)

2.0mlモデル(3602130110): 0.1ml~2.0ml容量調整できます。(0.1ml 刻み目盛)

5.0mlモデル(3605130110): 0.5ml~5.0ml容量調整できます。(0.5ml 刻み目盛)

**\* 煮沸消毒も簡単にできます。**

- 1) ヒートマチックをバスケット部、注射筒部、ハンドル部に分解します
- 2) 注射筒部、ハンドル部の2つのブロックをそのまま煮沸します



**煮沸消毒**

左図のように分解した注射筒部とハンドル部を沸騰した湯に完全に浸し、20分煮沸します

**製造販売元**

株川崎生物科学研究所

東京都目黒区中根 2-10-2

Tel : 03-3717-0818 Fax : 03-3717-0819

原産国 ドイツ