

煮沸

ヒートマチック連続注射器 マルチアダプタータイプ (5基)

(0.3mlモデル、1.0mlモデル、2.0mlモデル、5.0mlモデル)



- 煮沸消毒が可能です。
- 様々な口径の薬液ボトルが装着可能です。
〔付属のボトルアダプター3種から選択可能。詳細は下記をご参照ください〕
- ビルドイン機構なのでポンプ部の分解不要
↓
洗浄、消毒の際、微細な部品が紛失することはありません
- 液量確認可能な目盛付プラスチック注射筒
- 本体の分解箇所は1箇所ですのでメンテナンスが容易です

従来品



- ・20mm口径
- ・ボトルのみ適用可能

- マルチアダプタータイプ
付属のボトルアダプター3種類
- 白色：20mm口径用
 - 青色：30mm口径用
 - 緑色：33mm口径用

堅牢、長持ちです

簡単構造と高強度のエンジニアリングプラスチックの使用により高い耐久性を実現

細かい設定も簡単、正確にできます

0.3mlモデル (8300002189) : 0.1ml ~ 0.3ml 容量調整できます。(0.05ml 刻み目盛)

1.0mlモデル (8300007181) : 0.1ml ~ 1.0ml 容量調整できます。(0.05ml 刻み目盛)

2.0mlモデル (3602130110) : 0.1ml ~ 2.0ml 容量調整できます。(0.1ml 刻み目盛)

5.0mlモデル (3605130110) : 0.5ml ~ 5.0ml 容量調整できます。(0.5ml 刻み目盛)

煮沸消毒も簡単にできます

- (1)ヒートマチックをバスケット部、注射筒部、ハンドル部に分解します
- (2)注射筒部、ハンドル部の2つのブロックをそのまま煮沸します

製造販売元

(株)川崎生物科学研究所

東京都目黒区中根 2-4-17-304

Tel : 03-3717-0818 Fax : 03-3717-0819

原産国 ドイツ