

豚用助産具

# ループグローブ

グローブ（手袋）の指先に取り付けてある紐により特別な手技を必要としないで確実に新生豚を取り出せます

○ 簡単な構造 ➡ 頭又は脚の確保が簡単にできます

○ 両手で助産 ➡ 一人で助産できます




○ 分娩時間の短縮 ➡ 低酸素リスクを低減し、新生豚の損失低減が期待できます

○ ループ+手の操作 ➡ 新生豚の犬歯または後肢で産道を傷つけるリスクを低減します




1

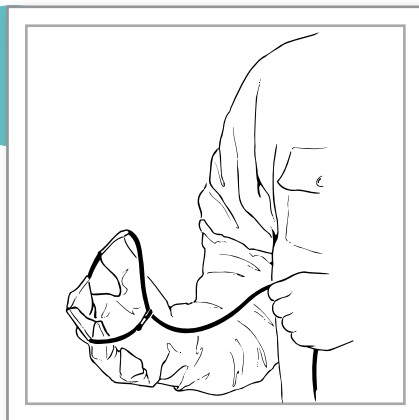


一方の手にグローブを装着し、親指、人差し指、中指でループを作る。他方の手で紐の先端を持つ

2

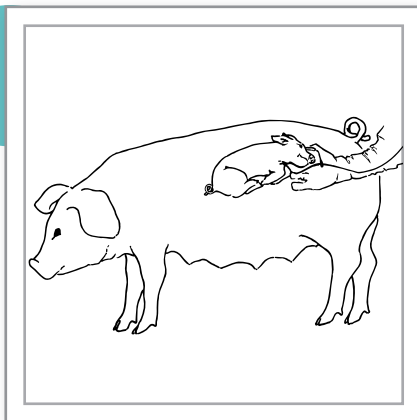

グローブをはめた手を母豚に挿入し、親指、人差し指、中指で作ったループを新生豚の頭部又は後肢にかける

3

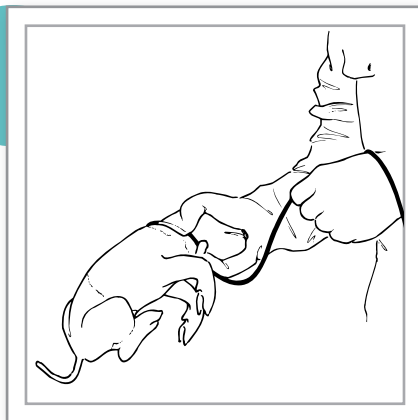

新生豚の犬歯又は後肢をグローブをはめたほうの手でカバーしながらもう一方の手で紐を引っ張り、新生豚を取り出す



ループグローブ  
の紹介動画

商品の詳細情報はこちら！お気軽にお問合わせ下さい。

URL : <http://www.kawasaki-seibutsu.com>

製造販売元 （株）川崎生物科学研究所 東京都目黒区中根 2-10-2 Tel:03-3717-0818